



Bio Clinic

FORNITURE DENTALI

CATALOGO | DISINFEZIONE

PARTNERSHIP WITH **CERICHEM**
BIOPHARM



2026

INDICE



DECONTAMINANTI

- Zimavir® pag. 2
- Proteoster pag. 2
- Sporeclean Matic pag. 3
- Benzovir pag. 3



STERILIZZANTI - DISINFETTANTI DI ALTO LIVELLO

- Pathoster® pag. 4
- Oxovir pag. 4
- Stericer pag. 5



RIVITALIZZAZIONE STRUMENTI IN ACCIAIO INOX

- Rugilux pag. 5



SUPERFICI - RIUNITO

- Sporeclean ACT pag. 6
- Sporeclean Spray pag. 6
- Clovidis pag. 7
- Alcodis pag. 7
- LC Guan / Sporeclean Wipes pag. 8
- LC Sal pag. 8
- Sporeclean Vacuum Plus pag. 9
- Neoster pag. 9
- Septavir Alcol 75+ pag. 10
- Sporeclean Surfaces pag. 10



DISINFETTANTI E DISSOLVENTI PER IMPRONTA

- Algivir pag. 11
- Imprevir pag. 11



ANTISETTICI

- Septavir Gel pag. 12
- Septavir Soap pag. 13



PROFUMATORI

- Prof pag. 13



IGIENE ORALE

- Benoral 0.20 pag. 14
- Benoral 0.02 pag. 14



ACCESSORI

- Steam Gun pag. 15
- Vasche per sterilizzazione pag. 15

Zimavir®

Strumentario chirurgico plurienzimatico con Ketovir®

DESCRIZIONE

Zimavir® è una soluzione concentrata plurienzimatica, **decontaminante e disinfettante** di livello intermedio. Formulazione chimica avanzata (contiene Ketovir®) micobattericida, fungicida, battericida, specifica per la **PRE-STERILIZZAZIONE** (decontaminazione-disinfezione e disaggregazione del biofilm microbico) dello strumentario odontoiatrico ed ospedaliero critico e semicritico, ad alto rischio di contaminazione biologica.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Zimavir® si usa diluito in acqua, utilizzando l'apposita camera di dosaggio integrata nel flacone, all'1% (10 ml per ogni litro d'acqua) immergendo gli strumenti per 10 minuti. Per un tempo di contatto di 5 minuti, diluire al 2% (20 ml per ogni litro d'acqua)
- **Composizione chimica**
Ketovir® 0,5 g; miscela plurienzimatica 3,0 g; porzione alchilica di tensioattivo cationico; alcool isopropilico; surfattanti; antiossidanti; coformulanti; colorante ed acqua depurata q.b. a 100 g.
1 flacone = 100 litri di soluzione
- **Attivo su BIOFILM MICROBICO**

PACKAGING

Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)

DISPOSITIVO MEDICO



€ 43,00 A400 Zimavir® - 1000 ml

Proteoster

Soluzione pre-sterilizzante per dispositivi medici invasivi

DESCRIZIONE

Proteoster è una soluzione concentrata **decontaminante e disinfettante** ad immersione, di livello intermedio, ad azione disagregante sul biofilm microbico; da utilizzare per dispositivi medici, critici e semicritici. Grazie alla miscela plurienzimatica innovativa, sinergizzata a Ketovir®, lo rende estremamente rapido ed efficace sia come detergente che come disinfettante in presenza di materiale organico. Particolarmente efficace su tutti i microrganismi patogeni, incluso il micobatterio della tubercolosi, in conformità alla norma EN 14885.

CARATTERISTICHE

- **Diluizione**
Proteoster si usa diluito in acqua utilizzando l'apposita camera di dosaggio integrata nel flacone; come detergente allo 0,5% (5 ml per ogni litro d'acqua) immergendo gli strumenti per 10 minuti; come disinfettante all'1% (10 ml per ogni litro d'acqua) immergendo gli strumenti per 15 minuti.
- **Composizione chimica**
Ketovir® 0,5 g, miscela plurienzimatica 6,0 g; tensioattivo cationico 20,0 g; anticorrosivi; acqua q.b. 100 g.
1 flacone = 200 litri di soluzione
- **Attivo su BIOFILM MICROBICO**

PACKAGING

Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)

DISPOSITIVO MEDICO



€ 60,00 PRT1000 Proteoster - 1000 ml

Sporeclean Matic

Strumentario chirurgico a base di **derivati fenolici**

DESCRIZIONE

Sporeclean Matic è una soluzione **detergente e disinfettante** di livello intermedio a base di derivati fenolici e sali di ammonio quaternario, **specifico per macchine automatiche**. La sinergia tra i principi attivi, garantisce un'attività biocida anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici). Specifico per strumentario chirurgico, odontoiatrico ed ospedaliero.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione vasca ultrasuoni**
1%: 10 ml per ogni litro d'acqua per un tempo di contatto di 10 min
- **Diluizione vasca automatica**
Versare nell'apposito contenitore della vasca automatica ed attenersi alle indicazioni del produttore
- **Composizione chimica**
Benzalconio cloruro 10,0 g; miscela fenolica 5,0 g; antischiumogeni; anticorrosivi; coformulanti; colorante ed acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (**Cartone 6 Fl.**)
- Tanica da 5000 ml (**Cartone 2 Ta.**)

DISPOSITIVO MEDICO



USO SPECIFICO



€ 42,00	HPM1000	Sporeclean Matic - 1000 ml
€ 150,00	HPM5000	Sporeclean Matic - 5000 ml

Benzovir

Strumentario chirurgico a base di **benzalconio cloruro**

DESCRIZIONE

Benzovir è una soluzione concentrata **detergente, decontaminante e disinfettante** di livello intermedio a base di sali d'ammonio quaternario sinergizzati con o-fenilfenolo. La componente fenolica garantisce un'eccellente attività biocida della soluzione in presenza di materiale organico come sangue, saliva, essudati organici, ecc. Specifico per strumentario chirurgico odontoiatrico ed ospedaliero.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
1%: 10 ml per ogni litro d'acqua - 2%: 20 ml per ogni litro d'acqua
- **Tempi di contatto**
10 min (all' 1%) - 5 min (al 2%)
- **Composizione chimica**
Benzalconio cloruro 10,0 g; o-fenilfenolo 5,0 g; antischiumogeni; anticorrosivi; coformulanti; colorante ed acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (**Cartone 6 Fl.**)
- Tanica da 5000 ml (**Cartone 2 Ta.**)

DISPOSITIVO MEDICO



USO SPECIFICO



€ 30,00	A500	Benzovir - 1000 ml
€ 125,00	A500L	Benzovir - 5000 ml

Pathoster®

Sterilizzante chimico a freddo - PAA tal quale

DISPOSITIVO MEDICO

DESCRIZIONE

Pathoster® long acting è una **soluzione da attivare** a base di acido peracetico tal quale allo 0,35%, sterilizzante **CHIMICO A FREDDO**. Pathoster® è conforme al paragrafo 5.3.1 della norma UNI EN 14937:2009. È **sporicida ad azione rapida**, in 5 minuti. È **sterilizzante** in 10 minuti.

Modalità d'impiego: immergere gli strumenti da trattare in una soluzione combinata tra flacone A + B. Durata attività soluzione 16 giorni.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Sterilizzante / Sporicida
- **Diluizione**
Soluzione pronta da attivare
- **Tempi di contatto**
10 min sterilizzante - 5 min sporicida / disinfettante
- **Composizione chimica**
Acido peracetico 0,35 g; stabilizzanti, tamponi, anticorrosivi ed acqua depurata q.b. a 100 g.
- **Attivo su**
Spore di Bacillus anthracis - Burkholderia mallei - Burkholderia pseudo-mallei - Yersinia pestis - Spore di Bacillus cereus - Francisella tularensis - Brucella melitensis - Brucella abortus

PACKAGING

1000 ml di soluzione attivabile: flacone A (930 ml) flacone B (70 ml) (Cartone 6 Fl.)



USO SPECIFICO

€ 42,00 PTR1000 Pathoster® - 1000 ml

Oxovir

Per strumentario chirurgico a base di **acido peracetico derivato**

DISPOSITIVO MEDICO

DESCRIZIONE

Oxovir è una polvere composta (acido peracetico derivato), idrosolubile, disinfettante di alto livello e sterilizzante per strumentario chirurgico odontoiatrico ed ospedaliero. Oxovir può essere utilizzato in vasca libera e vasca ad ultrasuoni immergendo gli strumenti nella diluizione per il tempo di contatto stabilito.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Sterilizzante / Sporicida / Virucida
- **Diluizione**
2%: 20 g per ogni litro d'acqua (29 g = 1 misurino pieno)
- **Tempi di contatto**
15 min (sporicida) - 30 min (sterilizzante)
- **Composizione chimica**
Sodio percarbonato 53,0 g; TAED 23,0 g; acido citrico anidro 11,0 g; enzimi; sequestranti; antiossidanti ed anticorrosivi q.b. a 100 g.

PACKAGING

Barattolo da 1 kg (Cartone 6 Ba.)



USO SPECIFICO

€ 38,00 A900 Oxovir - 1 kg

Stericer

Per strumentario chirurgico a base di **acido peracetico** e **perossido di idrogeno**

DISPOSITIVO MEDICO

DESCRIZIONE

Stericer è una soluzione **sporicida di alto livello** da attivare a base di **acido peracetico** e **perossido di idrogeno**. La sinergia dei principi attivi garantisce un ampio spettro d'azione rapido in 15 minuti, su tutti i microrganismi patogeni, garantendo piena compatibilità su tutti i materiali.

Modalità d'impiego: immergere gli strumenti da trattare in una soluzione combinata tra flacone A+B. Durata attività soluzione: 15 giorni.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Disinfettante di alto livello sporicida, tubercolicida, virucida, battericida e fungicida
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso da attivare
- **Composizione chimica**
Acido peracetico 0,19% e perossido di idrogeno
- **Attivo su**
Spore di Bacillus Subtilis - Bacillus Cereus - Micobatteri
Avium-Smegtatis - Batteri Pseudomonas Aeuginosa - Staphilococcus - Funghi Candida Albicans - Virus poliovirus - Adenovirus - HIV - HBV - HCV - Coronavirus

PACKAGING

1000 ml di soluzione attivabile: flacone A (960 ml) flacone B (40 ml) (Cartone 6 Fl.)

€ 45,00 STEH1000 Stericer - 1000 ml



Rugilux

Rivitalizzante per **strumenti in acciaio inossidabile**

RIVITALIZZAZIONE STRUMENTI IN ACCIAIO INOX

DESCRIZIONE

Rugilux è una soluzione rivitalizzante sicura, disincrostante moderatamente acida, per **rimuovere le macchie minerali, aloni e ruggine** che frequentemente si formano dopo la sterilizzazione a vapore. Aiuta ad allentare i morsi e le articolazioni indurite degli strumenti. Utilizzabile anche per vassoi di acciaio inossidabile, bacinelle e carrelli.

Composizione:

Derivati fosforici; tensioattivi non ionici; acqua depurata q.b. a 100 g; contiene acido fosforico.

Modalità d'uso

Diluizione al 12% (120 ml in 1 lt. di acqua calda tra i 50°C e gli 80°C), immergere gli strumenti nella soluzione per 15 minuti. Per strumenti molto macchiati immergerli per 30 minuti. Rimuovere gli strumenti dalla soluzione e risciacquarli, ripetere se necessario.

Rugilux non danneggia strumenti chirurgici in acciaio inossidabile.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)

€ 30,00 HR100 Rugilux - 1000 ml
€ 100,00 HR100/5 Rugilux - 5000 ml



Sporeclean ACT

Disinfettante spray sporicida

DESCRIZIONE

Sporeclean ACT è una soluzione **disinfettante sporicida** a base di perossido di idrogeno, miscela alcolica e acido lattico. Tale associazione permette di ottenere una completa attività disinfettante ad ampio spettro: fungicida, battericida, micobattericida, sporicida e attivo su virus con mantello. La presenza dell'acido lattico conferisce al formulato maggior potere disinfettante e ottimo potere disincrostante.

Campi d'impiego: prodotto pronto all'uso, nebulizzare con apposito erogatore spray direttamente sulle superfici o presidi da trattare e lasciare asciugare.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Fungicida, battericida, micobattericida, sporicida, virus con mantello
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempi di contatto**
1 min su virus con mantello - 5 min su altri batteri
- **Composizione chimica**
100 g di prodotto contengono: miscela alcolica, perossido d'idrogeno 6,0 g; acido lattico 0,3 g; acido citrico; acido fosforico; acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

Flacone da 750 ml (1 astuccio = 4 flaconi)

€ 19,50 x 4 Fl. Min. **SPCT/750** Sporeclean ACT - 750 ml (1 astuccio = 4 flaconi)
€ 89,00 **SPCT/5000** Tanica da 5000 ml. (Cartone 2 Ta.)

DISPOSITIVO MEDICO



Sporeclean Spray

Disinfettante spray a base di biguanide e derivati fenolici

DESCRIZIONE

Sporeclean Spray è un **disinfettante spray** a base di cloridrato di poliesametilene biguanide sinergizzato con derivati fenolici. Tale associazione permette di ottenere un'eccellente attività disinfettante, veloce e ad ampio spettro: tuberculicida, battericida, fungicida e virucida. Non viene inattivato dai materiali organici, anche se presenti in grandi quantità.

Campi d'impiego: adatto per la disinfezione di livello intermedio di superfici e piani di lavoro, riuniti odontoiatrici, vassoi portastrumenti e suppellettili dell'ambulatorio odontoiatrico.

CARATTERISTICHE

- **Soluzione acquosa**
- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempi di contatto**
2 min
- **Composizione chimica**
Poliesametilene biguanide 0,2 g; cloruro di didecildimetilammonio 0,5 g; miscela fenolica 0,15%; tensioattivi non ionici; sequestranti e acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

Flacone da 750 ml (1 astuccio = 4 flaconi)

€ 18,75 x 4 Fl. Min. **HP750** Sporeclean Spray - 750 ml (1 astuccio = 4 flaconi)
€ 89,00 **HP5000** Tanica da 5000 ml. (Cartone 2 Ta.)

DISPOSITIVO MEDICO



Clovidis

Disinfettante spray a base di **poliesametilene biguanide**

DESCRIZIONE

Clovidis è un **disinfettante spray** a base di cloridrato di poliesametilene biguanide sinergizzato con didecildimetilammonio cloruro. Tale associazione permette di ottenere un'eccellente attività **disinfettante, veloce e ad ampio spettro**: battericida GRAM+ e GRAM-, micobattericida, fungicida e virucida. Possiede, inoltre, proprietà **detergenti e sgrassanti**.

CARATTERISTICHE

- **Soluzione acquosa**
- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempi di contatto**
2 min
- **Composizione chimica**
Poliesametilene biguanide 0,2 g; cloruro di didecildimetilammonio 0,5 g; tensioattivi non ionici; sequestranti e acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 750 ml (1 astuccio = 6 flaconi)
- Tanica da 5000 ml

DISPOSITIVO MEDICO



€ 12,00 x 6 Fl. Min.	N700	Clovidis - 750 ml (1 astuccio = 6 flaconi)
€ 50,00	N700/5	Clovidis - 5000 ml (Cartone 2 Ta.)

Alcodis

Disinfettante spray a base di **DDQ** e miscela alcolica al 30%

DESCRIZIONE

Alcodis è un **disinfettante a base di alcol** isopropilico ed o-fenilfenolo, tale associazione permette di ottenere un'ottima attività disinfettante ad ampio spettro: battericida GRAM+ e GRAM-, fungicida e micobattericida. Possiede inoltre **proprietà detergenti e sgrassanti**.

CARATTERISTICHE

- **Soluzione idroalcolica**
- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempi di contatto**
5 min
- **Composizione chimica**
Miscela alcolica 30,0 g; o-fenilfenolo 0,05 g; DDQ 0,05 g; tensioattivi non ionici; sequestranti e acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 750 ml (1 astuccio = 6 flaconi)
- Tanica da 5000 ml

DISPOSITIVO MEDICO



€ 11,00 x 6 Fl. Min.	N200	Alcodis - 750 ml (1 astuccio = 6 flaconi)
€ 49,00	N200/5	Alcodis - 5000 ml (Cartone 2 Ta.)

LC Guan / Sporeclean Wipes

Salviette disinfettanti

DESCRIZIONE

LC Guan / Sporeclean Wipes sono salviette disinfettanti a base di cloridrato di poliesametilene biguanide sinergizzato con didecildimetilammonio cloruro. Tale associazione permette di ottenere un'eccellente attività disinfettante, veloce e ad ampio spettro: battericida GRAM+ e GRAM-, micobattericida, fungicida e virucida. Possiede inoltre proprietà **detergenti e sgrassanti**.

Campi d'impiego: si usa per la disinfezione di livello intermedio di superfici e piani di lavoro, riuniti odontoiatrici, vassoi portastrumenti e suppellettili dell'ambulatorio odontoiatrico.

CARATTERISTICHE

- **Soluzione acquosa**
- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempi di contatto**
2 min
- **Composizione chimica**
Poliesametilene biguanide 0,2 g; cloruro di didecildimetilammonio 0,5 g; tensioattivi non ionici; sequestranti e acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

Confezione da 72 pz. (Cartone 12 Cf.)

€ 14,00 HN700/W LC Guan / Sporeclean Wipes - 72 pz.



LC Sal

Salviette disinfettanti a base di alcol

DESCRIZIONE

LC Sal salviette disinfettanti a base di alcol isopropilico ed o-fenilfenolo. Tale associazione permette di ottenere un'ottima attività disinfettante ad ampio spettro: fungicida, battericida, micobattericida e attivo su virus con mantello. Possiede inoltre ottime **proprietà detergenti e dissolventi su residui organici**, come sangue e liquidi biologici.

Campi d'impiego: si usa per la disinfezione di livello intermedio di superfici e piani di lavoro, dispositivi medici non invasivi.

CARATTERISTICHE

- **Soluzione idroalcolica**
- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempi di contatto**
5 min
- **Composizione chimica**
100 g di prodotto contengono: miscela alcolica 30,0 g; o-fenilfenolo 0,05 g; DDQ 0,01 g; tensioattivi non ionici; sequestranti e acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

Confezione da 72 pz. (Cartone 12 Cf.)



€ 14,00 H200/W LC Sal - 72 pz.

Sporeclean Vacuum Plus

Per circuiti di aspirazione a base di **miscela fenolica**

DESCRIZIONE

Sporeclean Vacuum Plus è una **soluzione disinfettante** di livello intermedio, **specificata per circuiti di aspirazione chirurgica-odontoiatrica ed ospedaliera**. La presenza della miscela fenolica garantisce un'eccellente attività biocida della soluzione, in presenza di materiale organico come sangue, saliva, essudati organici, ecc. Riduce la formazione di depositi calcarei.

Campi d'impiego: si usa sempre diluito al 2% (20 ml di concentrato in 1 litro di acqua calda), come decontaminante; diluito al 4% (40 ml di concentrato in 1 litro di acqua calda), per la disinfezione dei circuiti di aspirazione dei riuniti odontoiatrici.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione concentrata da diluire
- **Composizione chimica**
P-cloro-m-cresolato 3,6 g; o-fenilfenato 3,6 g; fenolo 0,1 g ed acqua depurata q.b. a 100 ml.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (**Cartone 6 Fl.**)
- Tanica da 5000 ml (**Cartone 2 Ta.**)

DISPOSITIVO MEDICO



€ 45,00	SPCP/1000	Sporeclean Vacuum Plus - 1000 ml
€ 180,00	SPCP/5000	Sporeclean Vacuum Plus - 5000 ml

Neoster

Per circuiti di aspirazione a base di **benzalconio cloruro**

DESCRIZIONE

Neoster concentrato è una soluzione disinfettante di livello intermedio, **specificata per circuiti di aspirazione chirurgica-odontoiatrica ed ospedaliera**. Neoster garantisce un'eccellente attività biocida anche in presenza di materiale organico come sangue, saliva, essudati organici, ecc.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
1%: 10 ml per ogni litro di acqua
- **Tempo di contatto**
5 min
- **Composizione chimica**
Sali d'ammonio quaternario 10,0 g; antischiumogeni; anticorrosivi; coformulanti; colorante ed acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (**Cartone 6 Fl.**)
- Tanica da 5000 ml (**Cartone 2 Ta.**)

DISPOSITIVO MEDICO



€ 32,00	A300NEO	Neoster - 1000 ml
€ 126,00	A300NEO/5	Neoster - 5000 ml

Septavir Alcol 75+

Detergente igienizzante multiuso

DESCRIZIONE

Septavir Alcol 75+ è una soluzione senza risciacquo a base alcolica ad azione detergente-igienizzante, per tutte le superfici e i piani di lavoro.

CONTENUTO IN ALCOL ETILICO secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 Covid-19.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Battericida, virucida e fungicida
- **Diluizione**
Pronto all'uso
- **Composizione chimica (Reg. Deterg. 648/2004/CE)**
Profumo: limone. Contiene alcol etilico al 75% p/p
- **Controlli di qualità**
L'azienda opera con un sistema di qualità completo in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2015 - UNI EN 13485/2016.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)



IGIENIZZANTE

€ 10,40	SEPALC/1000	Septavir Alcol 75+ - 1000 ml
€ 41,60	SEPALC/5000	Septavir Alcol 75+ - 5000 ml

Sporeclean Surfaces

Detersificante per superfici dure

DESCRIZIONE

Sporeclean Surfaces è una soluzione specifica per la **detersione e sanificazione di pavimenti e superfici dure** di strutture sanitarie ospedaliere, case di cura, studi odontoiatrici, veterinari e laboratori di analisi. Risulta **ideale anche per pavimenti di ambienti pubblici e privati** ad alta affluenza che richiedono un trattamento igienizzante quotidiano professionale: scuole, asili, palestre, sale d'attesa, bagni pubblici, ecc.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Antibatterico
- **Diluizione**
50 ml in 5 litri di acqua
- **Composizione chimica**
Benzalconio cloruro; tensioattivi non ionici; fosfati

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)



SANIFICANTE

€ 19,00	HPS1000	Sporeclean Surfaces - 1000 ml
€ 60,00	HPS5000	Sporeclean Surfaces - 5000 ml

Algivir

Dissolvente per alginati e gessi

DESCRIZIONE

Algivir è un prodotto indicato per la rimozione degli alginati da strumenti e portaimpronte di ogni tipo. Inoltre, grazie alla presenza di numerose sostanze antibatteriche contenute nella formulazione, possiede eccezionali proprietà igienizzanti tali da rendere gli articoli trattati sicuri nella manipolazione e pronti alla successiva fase di disinfezione e sterilizzazione.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Antibatterico
- **Diluizione**
10%: 100 ml per ogni litro di acqua
- **Tempo di contatto**
30 min
- **Composizione chimica**
Tensioattivi cationici; sequestranti; antiossidanti ed acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)

SANIFICANTE



€ 17,00	ALG1000	Algivir - 1000 ml
€ 85,00	ALG5000	Algivir - 5000 ml

Imprevir

Disinfettante spray per impronte dentali

DESCRIZIONE

Imprevir è un disinfettante spray pronto all'uso destinato alla disinfezione rapida, efficace e ad ampio spettro delle impronte dentali contaminate da materiale biologico potenzialmente infetto, come sangue e saliva. Può essere nebulizzato su dispositivi medici in silicone, alginato, gomma poliestere, ecc. dei quali non ne altera la forma mantenendola stabile e affine con i gessi.

CARATTERISTICHE

- **Spettro d'azione**
Micobattericida (livello intermedio)
- **Diluizione**
Soluzione pronta all'uso
- **Tempo di contatto**
5 min
- **Composizione chimica**
30% di miscela alcolica (alcol etilico e isopropilico); o-fenilfenolo; tensioattivi cationici; tensioattivi non ionici; sequestranti e acqua depurata q.b. a 100 g.

PACKAGING

- Flacone da 750 ml (Cartone 6 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)

DISPOSITIVO MEDICO



€ 17,00	A1200	Imprevir - 750 ml
€ 85,00	A1200/5	Imprevir - 5000 ml

Septavir Gel - PMC Reg. Ministero della Salute N° 20271

Gel disinfettante mani

DESCRIZIONE

Septavir **gel disinfettante mani** è un gel antiseptico per le mani, pronto all'uso, che **non necessita di risciacquo**; si asciuga velocemente e lascia le mani fresche e morbide. L'alcol etilico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) al 70% in peso, principio attivo contenuto nel Septavir gel disinfettante mani, appartiene al gruppo chimico degli alcoli alifatici ed è un liquido incolore, limpido, di odore caratteristico gradevole, che evapora prontamente. La formulazione del Septavir gel disinfettante mani è, inoltre, **arricchita con sostanze umettanti ed emollienti per la cute**, le quali minimizzano l'effetto disidratante dell'alcol e ne incrementano l'attività biocida, attraverso un prolungamento del tempo di asciugatura e, pertanto, del tempo di contatto con il principio attivo. Septavir gel disinfettante mani è indicato per la decontaminazione delle mani degli operatori ospedalieri ed odontoiatrici, nonché, per tutte le figure sanitarie che lavorano in ambienti ad alto rischio di contaminazione biologica.

PACKAGING

- Flacone da 80 ml
- Flacone da 500 ml
- Flacone da 1000 ml
- Tanica da 5000 ml
- Tanica per dispenser da 5000 ml



€ 3,00	SGM80	Septavir - 80 ml (Cartone 80 Fl.)
€ 10,00	SGM500	Septavir - 500 ml (Cartone 20 Fl.)
€ 18,00	SGM1000	Septavir - 1000ml (Cartone 6 Fl.)
€ 90,00	SGM5000	Septavir - 5000 ml (Cartone 2 Ta.)
€ 90,00	SGM5000DISP	Septavir - Tanica per dispenser - 5000 ml

Septavir Soap

Sapone mani

DESCRIZIONE

Septavir Soap è un sapone mani detergente igienizzante a base di acido lattico. Con il suo potere detergente allontana fisicamente la flora microbica transitoria della cute ed è **adatto al lavaggio delle mani del personale medico e paramedico**, di ambulatori medico/dentistici e per tutte quelle attività lavorative che richiedono un alto livello di igiene delle mani. Uso professionale.

Per ogni situazione quotidiana dove è necessaria e consigliata la pulizia profonda delle mani.

PACKAGING

- Flacone da 500 ml (Cartone 20 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)



€ 7,00	A1000	Septavir Soap - 500 ml
€ 60,00	A1000/5	Septavir Soap - 5000 ml

PROFUMATORI

Prof

Profumatore professionale

DESCRIZIONE

Prof è un profumatore concentrato per uso professionale formulato per deodorare ed igienizzare gli ambienti pubblici ad alta affluenza come sale d'attesa, mezzi di trasporto, cinema, ristoranti ecc.

La sua formulazione innovativa a pH neutro e ad azione antistatica è in grado di eliminare i cattivi odori, profumare, detergere, igienizzare a fondo, rimuovendo germi e batteri, spolverare qualsiasi superficie e persistere nel tempo grazie alle sue fragranze accuratamente selezionate che permeano l'ambiente con delicatezza.

Vaporizzato puro nell'ambiente o su tende e tappeti per deodorare e neutralizzare gli odori; vaporizzato su un panno umido per la pulizia di ogni superficie lavabile, perfino sul legno e sui rivestimenti in pelle; diluito in acqua (1ml/1lt) per profumare i pavimenti.

PACKAGING

Flacone da 300ml (Cartone 20 Fl.)



€ 8,90	PRFV/300	Prof - Vanilla Poetry
€ 8,90	PRFC/300	Prof - Citrus Fruit
€ 8,90	PRFA/300	Prof - Alpen Fresh
€ 8,90	PRFS/300	Prof - Spring Bouquet

Benoral 0.20

Collutorio intensivo clorexidina 0.20

DESCRIZIONE

Benoral 0.20 esplica un'azione antiplacca continua e prolungata nel tempo per la capacità della clorexidina di fissarsi a lungo sulle mucose, sulle gengive e sullo smalto dei denti, risultando così un efficace **antibatterico del cavo orale**. L'assenza di alcol rispetta maggiormente le mucose, aumenta la compliance del prodotto e non interagisce con cementi, resine, ecc. proteggendoli dall'abrasione alcolica. Contiene inoltre principi attivi di origine vegetale che aiutano a **combattere problemi di alitosi** (aloe vera).

PACKAGING

- Flacone da 250 ml (Cartone 18 Fl.)
- Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)
- Tanica da 5000 ml (Cartone 2 Ta.)



€ 4,50	0003905	Benoral 0.20 - 250 ml
€ 12,00	0003906	Benoral 0.20 - 1000 ml
€ 50,00	0003907	Benoral 0.20 - 5000 ml

Benoral 0.02

Collutorio quotidiano clorexidina 0.02 con fluoro

DESCRIZIONE

Benoral 0.02 con fluoro è un'associazione di clorexidina a bassa concentrazione e fluoruro di sodio ad **azione remineralizzante protettiva, antiplacca ed acariogena**. Benoral 0.02 contiene principi attivi di origine vegetale (aloe vera) che **aiutano a combattere i problemi di alitosi**. L'assenza di alcol rispetta maggiormente le mucose, aumenta la compliance del prodotto e non interagisce con cementi, resine, ecc. proteggendoli dall'abrasione alcolica.

PACKAGING

- Flacone da 100 ml (Cartone 50 Fl.)
- Flacone da 250 ml (Cartone 18 Fl.)
- Flacone da 1000 ml (Cartone 6 Fl.)



€ 2,90	0003910	Benoral 0.02 - 100 ml
€ 4,50	0003909	Benoral 0.02 - 250 ml
€ 12,00	0003908	Benoral 0.02 - 1000 ml

Steam Gun

Atomizzatore manuale ricaricabile

DESCRIZIONE

Steam Gun è un atomizzatore manuale ricaricabile, particolarmente indicato per il reprocessing automatico delle superfici ad alto rischio infettivo in ambito sanitario.

Le soluzioni chimiche utilizzate, consentono un'efficacia biocida ad ampio spettro d'azione in soli 5 sec. sulla base dei test di laboratorio, certificati da Accredia.

Efficacia:

Sporicida, Micobattericida, Battericida, Fungicida, Virucida incluso Coronavirus.

Campi d'impiego:

Nebulizzare il disinfettante su tutte le superfici ad alto rischio infettivo ad una distanza di 30 cm. Erogare rapidamente in 5 sec. Non necessita di risciacquo e asciugatura.

PACKAGING

- 1 Atomizzatore
- 1 Cavo USB TYPE-C per ricaricare



€ 490,00 00340730 Steam Gun

Vasche per sterilizzazione

DESCRIZIONE


Vasche in plastica, utilizzate per il processo di decontaminazione e sterilizzazione chimica dello strumentario chirurgico.

Provviste di coperchio e griglia di immersione.

PACKAGING

- Vasca da 1 litro
- Vasca da 3 litri

Vasca 3 litri

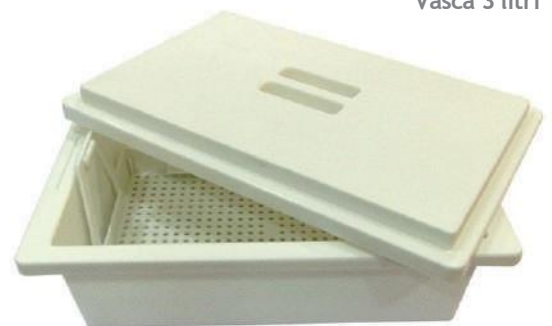

Vasca 1 litro



€ 31,50 00340900 Vasca da 1 litro
€ 54,00 00340041 Vasca da 3 litri

Note

PRODOTTO DISTRIBUITO DA:



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com