


VENUS
DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE



JET
IMPLANT

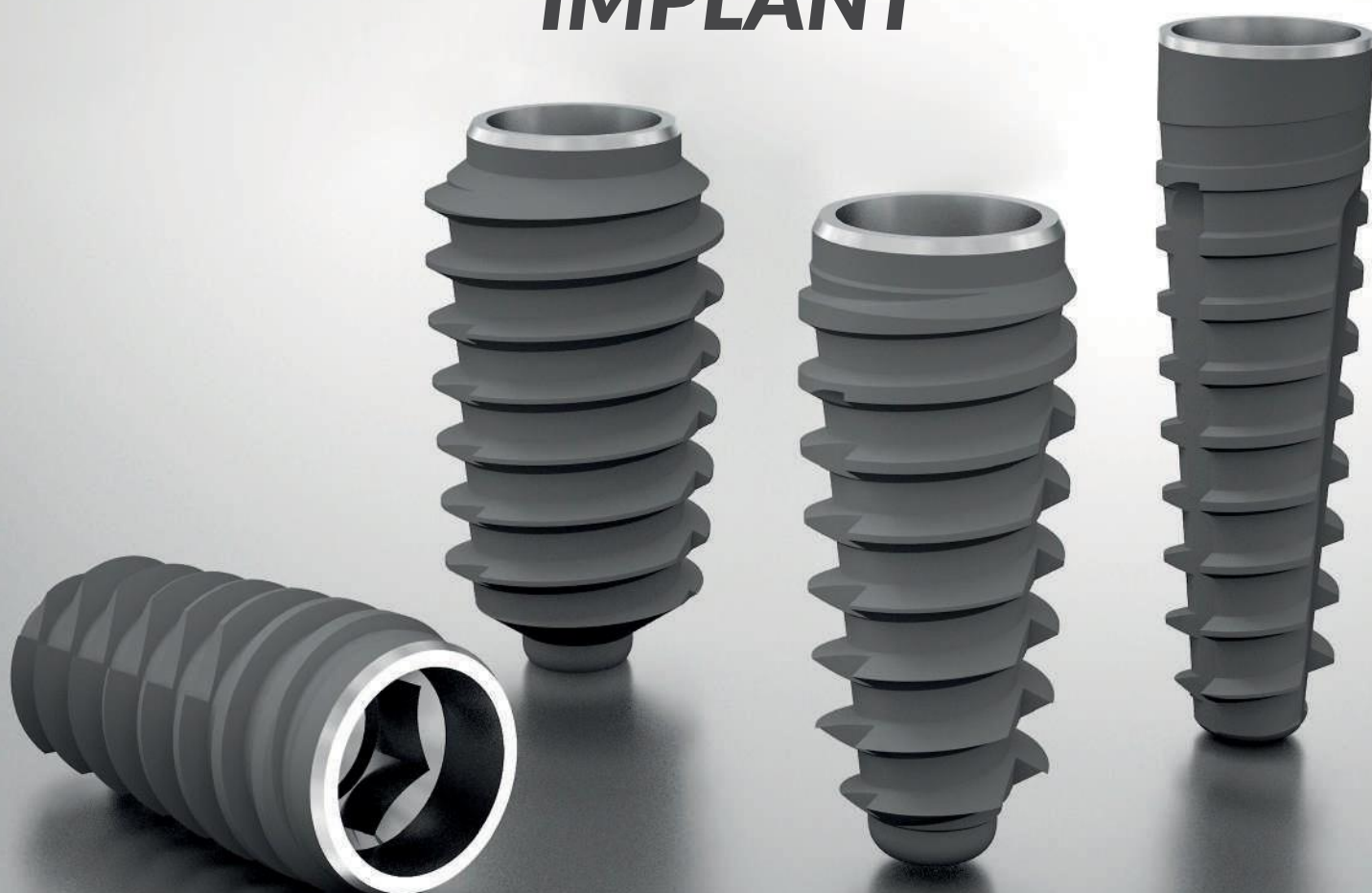

VENUS


DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE

Impianti dentali Venus

Con Venus si è voluto progettare una linea implantare con la quale la chirurgia ossea possa essere il più possibile semplificata, versatile ma soprattutto adatta alle tipologie ossee tipo D1 • D2 • D3 • D4.

La sua morfologia esterna ha un profilo conico, ed un filetto automaschiante che permette di ottenere un facile puntamento nella parte più prossimale dell'alveolo implantare osseo, guidando l'impianto, durante la sua rotazione ed avanzamento lungo l'asse dell'alveolo osseo.

Provvisto di profili di taglio lungo l'asse per meglio inserirsi e stabilizzarsi in situazioni ossee compatte D1 e D2, Venus con la tipologia Large mette a disposizione del professionista la possibilità di avere un sistema implantare particolarmente efficace in osso particolarmente tenero, midollare, dove sfrutteremo al meglio le sue caratteristiche di maggior superficie implantare ottenendo una sufficiente garanzia di stabilizzazione primaria anche in tipologie ossee D3-D4.

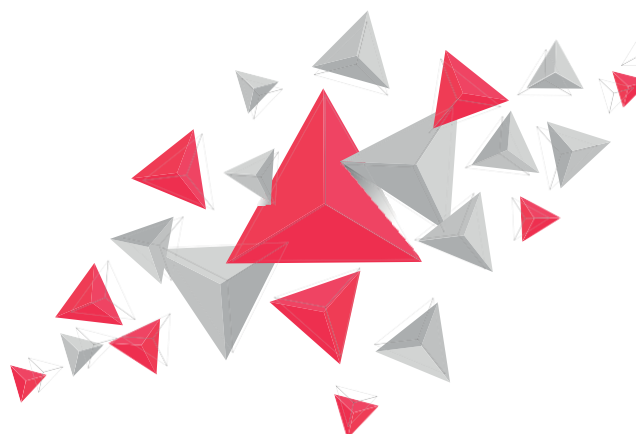

Venus è un sistema implantare della famiglia Synthesy che risponde alla moderna implantologia, avendo una connessione conometrica precisa, priva di micromovimenti, durevole nel tempo, sfruttando la frizione interna del cono. Venus oltre ad avere molteplici soluzioni protesiche è disponibile con due tipologie di superfici:

- *completamente trattata,*
- *trattata e macchinata.*

Venus permette al professionista di programmare (laddove indicato) qualsiasi riabilitazione implantoprotesica.

Connessione
conometrica
da 2.30 mm



Colletto macchinato
per poter inserire
impianto sotto la corticale



Forma conica e spire
automaschianti per facilitare
per ottenere stabilità primaria
e compattezza nell'osso.



Apice arrotondato



▲ Impianto VENUS



Diametri disponibili in mm:
3.50 - 3.80 - 4.20 - 4.80 - 5.30

Lunghezze disponibili in mm:
70 - 80 - 100 - 120 - 14.0

▲ Impianto VENUS LARGE





Diametri disponibili in mm:
3.50 - 3.80 - 4.20 - 4.80 - 5.30


Lunghezze disponibili in mm:
70 - 80 - 100 - 120 - 14.0

UNICA CONNESSIONE PER
TUTTI I DIAMETRI

Diametri minimi consigliati nella riabilitazione implanto-protesica del singolo elemento dentale.

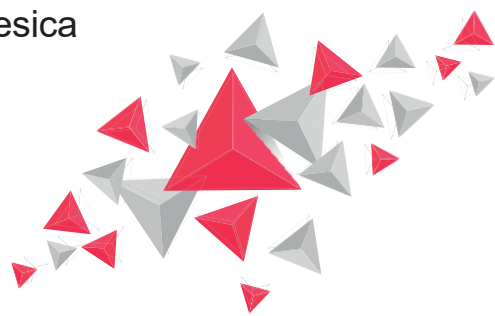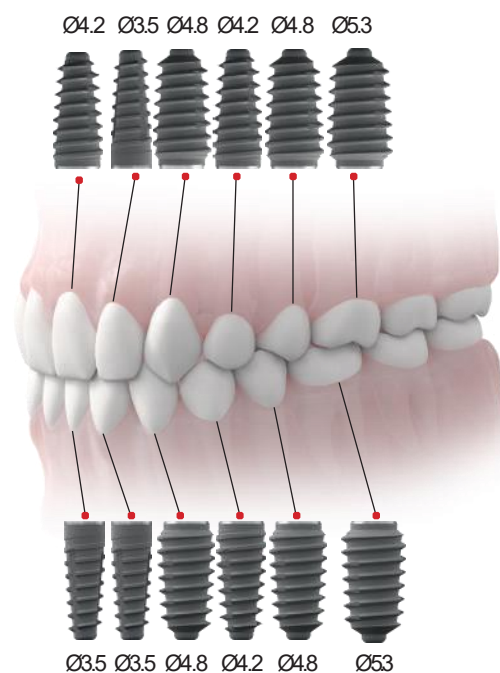





Implanto VENUS LARGE

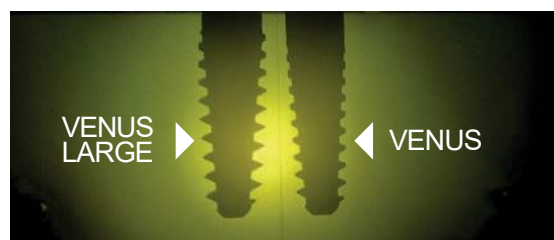

Implanto Venus Large con corpo uguale e spire maggiorate di 0,5 mm rispetto al classico Venus.


Trattamento superficiale

La superficie implantare SYNTHESY NEWIMPLANT® DUALGRIP® SURFACE microritensiva viene realizzata con un processo standardizzato e controllato di sabbatura, pulizia e sterilizzazione. Il materiale di sabbatura AL2O3 ci permette di ottenere una specifica topografia superficiale macro e microruvida differenziata.

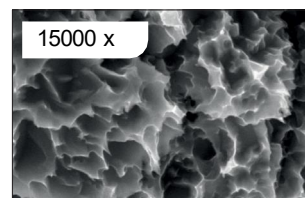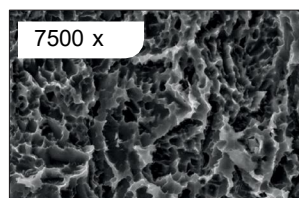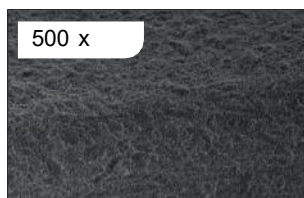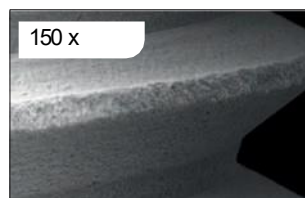

La verifica della resa morfologica ricercata avviene attraverso l'analisi con microscopio elettronico a scansione SEM (Scanning Electron Microscope) che consente un'accurata osservazione della superficie dell'implanto.

Confezionamento impianti, protesica e strumenti chirurgici Venus

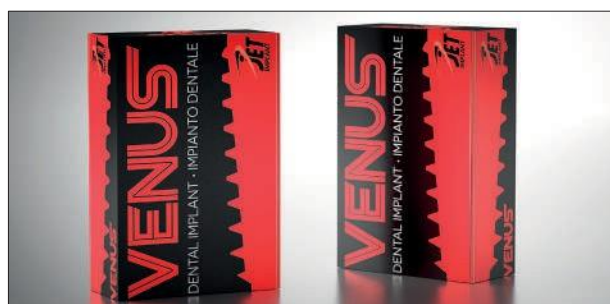


Confezione implanto Venus



Porta Blister e Blister Implanto



Blister Implanto

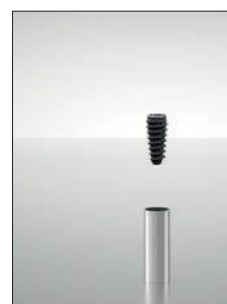


Estrazione implanto



Confezioni componenti protesici e strumentario chirurgico


VENUS

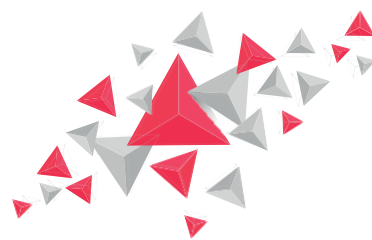


Descrizione	Diametro	Altezza	Standard	Large
Impianto Venus	Ø3.5mm	H70mm	3235070S	3235070L
Impianto Venus	Ø3.5mm	H8.0mm	3235080S	3235080L
Impianto Venus	Ø3.5mm	H10mm	3235100S	3235100L
Impianto Venus	Ø3.5mm	H12mm	3235120S	3235120L
Impianto Venus	Ø3.5mm	H14mm	3235140S	3235140L
Impianto Venus	Ø3.8mm	H70mm	3238070S	3238070L
Impianto Venus	Ø3.8mm	H8.0mm	3238080S	3238080L
Impianto Venus	Ø3.8mm	H10mm	3238100S	3238100L
Impianto Venus	Ø3.8mm	H12mm	3238120S	3238120L
Impianto Venus	Ø3.8mm	H14mm	3238140S	3238140L
Impianto Venus	Ø4.2mm	H70mm	3242070S	3242070L
Impianto Venus	Ø4.2mm	H8.0mm	3242080S	3242080L
Impianto Venus	Ø4.2mm	H10mm	3242100S	3242100L
Impianto Venus	Ø4.2mm	H12mm	3242120S	3242120L
Impianto Venus	Ø4.2mm	H14mm	3242140S	3242140L
Impianto Venus	Ø4.8mm	H70mm	3248070S	3248070L
Impianto Venus	Ø4.8mm	H8.0mm	3248080S	3248080L
Impianto Venus	Ø4.8mm	H10mm	3248100S	3248100L
Impianto Venus	Ø4.8mm	H12mm	3248120S	3248120L
Impianto Venus	Ø4.8mm	H14mm	3248140S	3248140L
Impianto Venus	Ø5.3mm	H70mm	3253070S	
Impianto Venus	Ø5.3mm	H8.0mm	3253080S	
Impianto Venus	Ø5.3mm	H10mm	3253100S	
Impianto Venus	Ø5.3mm	H12mm	3253120S	
Impianto Venus	Ø5.3mm	H14mm	3253140S	

Protocolli chirurgici impianti VENUS


VENUS Ø3.5

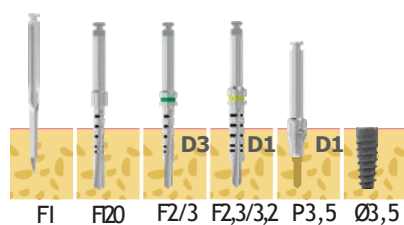


VENUS Ø3.8

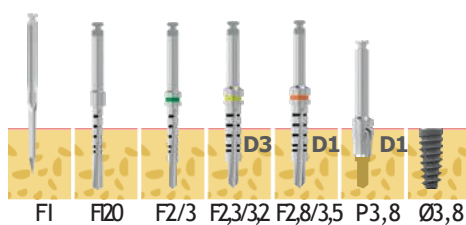


VENUS Ø4.2

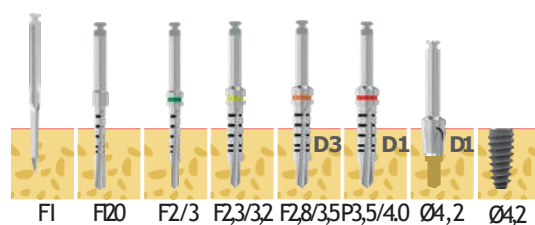

VENUS Ø4.8

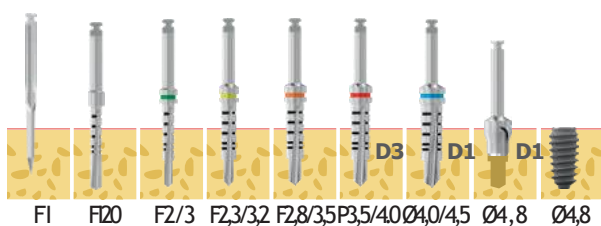


VENUS Ø5.3

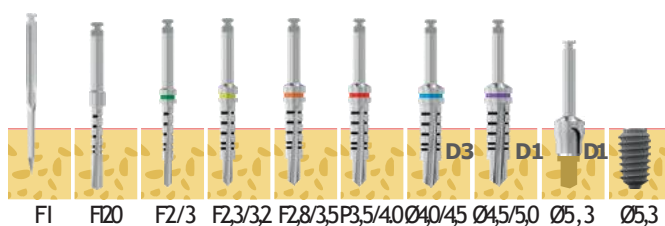


Kit
Chirurgico ▲

VENUS
DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE

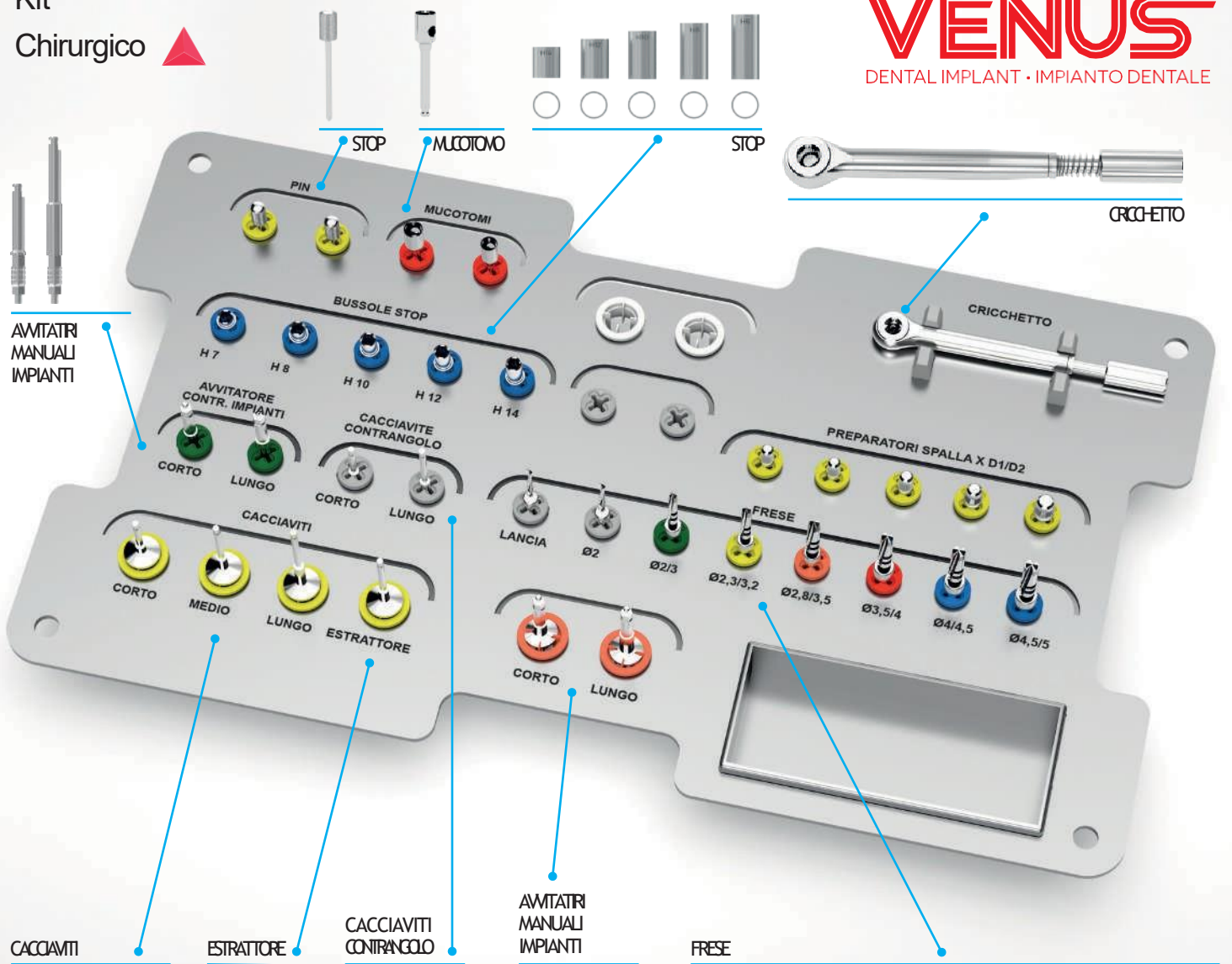

Descrizione	Diametro	Codice
Mucotomo		MU
Fresa iniziale	Ø1,5	FI
Fresa	Ø2,0	F2
Fresa	Ø2,3	F2-3
Fresa	Ø2,3/3,2	F2,3/3,2
Fresa	Ø2,8/3,5	F2,8/3,5
Fresa	Ø3,5/4,0	F3,5/4
Fresa	Ø4,0/4,5	F4/4,5
Fresa	Ø4,5/5,0	F4,5/5
Preparatore di spalla	Ø3,5	P3,5
Preparatore di spalla	Ø3,8	P3,8
Preparatore di spalla	Ø4,2	P4,2
Preparatore di spalla	Ø4,8	P4,8
Preparatore di spalla	Ø5,3	P5,3
Stop di Profondità	Altezze SP 14 • SP 12 • SP 10 • SP 8 • SP 6	

Descrizione	Diametro	Codice
Avvitatore 2 corto jet		XS3001
Avvitatore 2 medio jet		XS3002
Avvitatore 12 lungo jet		XS3003
Avvitatore 12 corto per contrangolo		XS3004
Avvitatore 12 lungo per contrangolo		XS3005
Driver corto per impianto manuale		XS3006
Driver lungo per impianto manuale		XS3007
Driver corto impianto per contrangolo		XS3008
Driver lungo impianto per contrangolo		XS3009
Driver avvitatore per mua		XS3010
Driver estrattore		XS3011
Chiave diametrica K2 con 5 innesti		S-1100

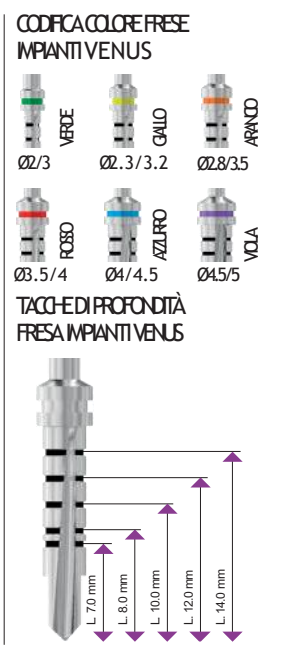

	Descrizione		Codice
	Vite tappo		30-001
	Descrizione	Diametro Altezza Ang.	Codice
	Vite di guarigione Ø4.0mm H1mm	-	30-101
	Vite di guarigione Ø4.0mm H2mm	-	30-102
	Vite di guarigione Ø4.0mm H3mm	-	30-103
	Vite di guarigione Ø4.0mm H4mm	-	30-104
	Vite di guarigione Ø4.0mm H5mm	-	30-105
	Vite di guarigione Ø4.0mm H6mm	-	30-106
	Vite di guarigione Ø4.0mm H7mm	-	30-107
	Vite di guarigione Ø5.0mm H1mm	-	30-111
	Vite di guarigione Ø5.0mm H2mm	-	30-112
	Vite di guarigione Ø5.0mm H3mm	-	30-113
	Vite di guarigione Ø5.0mm H4mm	-	30-114
	Vite di guarigione Ø5.0mm H5mm	-	30-115
	Vite di guarigione Ø5.0mm H6mm	-	30-116
	Vite di guarigione Ø5.0mm H7mm	-	30-117
	Vite di guarigione Ø6.0mm H1mm	-	30-131
	Vite di guarigione Ø6.0mm H2mm	-	30-132
	Vite di guarigione Ø6.0mm H3mm	-	30-133
	Vite di guarigione Ø6.0mm H4mm	-	30-134
	Vite di guarigione Ø6.0mm H5mm	-	30-135
	Vite di guarigione Ø6.0mm H6mm	-	30-136

	Descrizione	Diametro Altezza Ang.	Codice
	Abt. 0° senza spalla - H1mm	A0°	30-210
	Abt. 0° senza spalla - H2mm	A0°	30-211
	Abt. 0° senza spalla - H3mm	A0°	30-212
	Abt. 0° senza spalla - H4mm	A0°	30-213
	Abt. 0° senza spalla - H5mm	A0°	30-214
	Abutment 0° spalla - H1mm	A0°	30-215
	Abutment 0° spalla - H2mm	A0°	30-216
	Abutment 0° spalla - H3mm	A0°	30-217
	Abutment 0° spalla - H4mm	A0°	30-218
	Abutment 0° spalla - H5mm	A0°	30-219
	Abt. 15° no spalla - H1mm	A15°	30-220
	Abt. 15° no spalla - H2mm	A15°	30-221
	Abt. 15° no spalla - H3mm	A15°	30-222
	Abt. 15° no spalla - H4mm	A15°	30-223
	Abt. 15° no spalla - H5mm	A15°	30-224
	Abutment 15° spalla - H1mm	A15°	30-225
	Abutment 15° spalla - H2mm	A15°	30-226
	Abutment 15° spalla - H3mm	A15°	30-227
	Abutment 15° spalla - H4mm	A15°	30-228
	Abutment 15° spalla - H5mm	A15°	30-229
	Abt. 25° no spalla - H1mm	A25°	30-230
	Abt. 25° no spalla - H2mm	A25°	30-231
	Abt. 25° no spalla - H3mm	A25°	30-232
	Abt. 25° no spalla - H4mm	A25°	30-233
	Abt. 25° no spalla - H5mm	A25°	30-234
	Abutment 25° spalla - H1mm	A25°	30-235
	Abutment 25° spalla - H2mm	A25°	30-236
	Abutment 25° spalla - H3mm	A25°	30-237
	Abutment 25° spalla - H4mm	A25°	30-238
	Abutment 25° spalla - H5mm	A25°	30-239

Descrizione	Diametro	Altezza	Ang.	Codice
Abutment Conico 0°	-	H1mm	A0°	30-360
Abutment Conico 0°	-	H2mm	A0°	30-361
Abutment Conico 0°	-	H3mm	A0°	30-362
Abutment Conico 0°	-	H4mm	A0°	30-363
Abutment Conico 0°	-	H5mm	A0°	30-364
Abutment Conico 17°	-	H1mm	A0°	30-370
Abutment Conico 17°	-	H2mm	A0°	30-371
Abutment Conico 30°	-	H3mm	A0°	30-380
Abutment Conico 30°	-	H4mm	A0°	30-381


Descrizione	Codice
Vite di guarigione per abutment conico	30-150
Toretta per abutment conico	30-366
Toretta cromocobalto	30-367
Toretta inclinabile per abutment conico	30-368
Analogo per abutment conico	30-510
Transfer per abutment conico	30-612
Vite per transfer abutment conico	30-051

Descrizione	Codice
Vite secondaria	30-021
Vite secondaria blu	30-022
Vite primaria	30-011
Vite primaria blu	30-012

Descrizione	Altezza	Codice
Attacco a bottone	h1mm	30-801
Attacco a bottone	h2mm	30-802
Attacco a bottone	h3mm	30-803
Attacco a bottone	h4mm	30-804
Attacco a bottone	h5mm	30-805
Attacco a bottone	h6mm	30-806
Contentore acciaio inox		041CANB
Ritenzione nera per attacco a bottone		043CLN
Ritenzione gialla per attacco a bottone		060CRNAY
Ritenzione rosa per attacco a bottone		040CRNSN
Ritenzione bianca per attacco a bottone		040CRNSN
Ritenzione verde per attacco a bottone		049PCN

VENUS

DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE

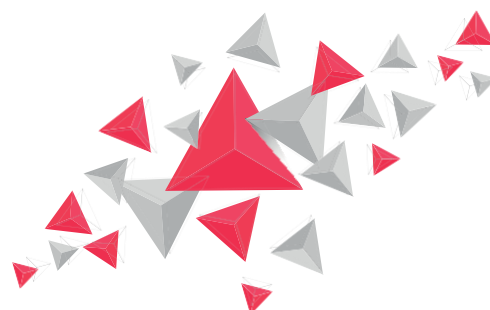

Descrizione	Altezza	Codice
 Locator Venus H1	H1	30807
 Locator Venus H2	H2	30808
 Locator Venus H3	H3	30809
 Locator Venus H4	H4	30810
 Locator Venus H5	H5	30811
 Locator Venus H6	H6	30812
 Kit di lavorazione locator		SMOOL

Descrizione	Codice
-------------	--------

Analog per impianto	30512
---------------------	-------

Descrizione	Codice
-------------	--------

Abutment provvisorio non rotante	30340
Abutment provvisorio rotante	30350

Descrizione	Altezza	Codice
-------------	---------	--------

Calcinabile base cromo non rotante H2mm	H2mm	30341
Calcinabile base cromo non rotante H3mm	H3mm	30342
Calcinabile base cromo rotante H2mm	H2mm	30351
Calcinabile base cromo rotante H3mm	H3mm	30352

Descrizione	Codice
-------------	--------

Abutment calcinabile non rotante	30410
Abutment calcinabile rotante	30411

Descrizione	Codice
-------------	--------

Transfer open tray short	30610
--------------------------	-------

Transfer open tray long	30611
-------------------------	-------

Vite per transfer short	30041
-------------------------	-------

Vite per transfer long	30042
------------------------	-------

Vite per transfer strappo	30613
---------------------------	-------

Descrizione	Altezza	Codice
-------------	---------	--------

T base non rotante H7mm	H7mm	30382
T base rotante H7mm	H7mm	30383

Descrizione

Codice

Kit
Cacciaviti Studio


1 Vassoio
15 Cacciaviti
1 Chiave



Kit
Cacciaviti

1 Base
6 Cacciaviti




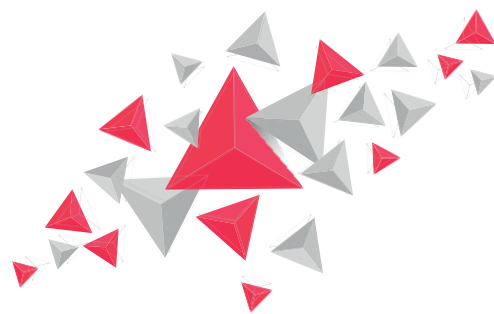

JETIMPLANT, forte dell'esperienza maturata in trent'anni d'impegno nel settore implantologico, medico ortopedico e grazie alla costante continua ricerca, vi offre prodotti innovativi di alta qualità.

Obiettivo di JETIMPLANT è migliorare la qualità ed il lavoro del medico implantologo.

Altro obiettivo è il costante impegno alla messa a punto di prodotti che tendano al superamento degli standard attuali, al complesso sviluppo che si può definire "Implantologia di successo".

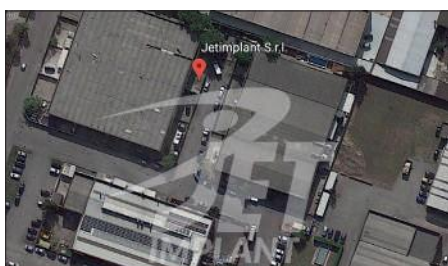

PRODOTTO IN ESCLUSIVA DISTRIBUITO DA :



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com