



JET
IMPLANT

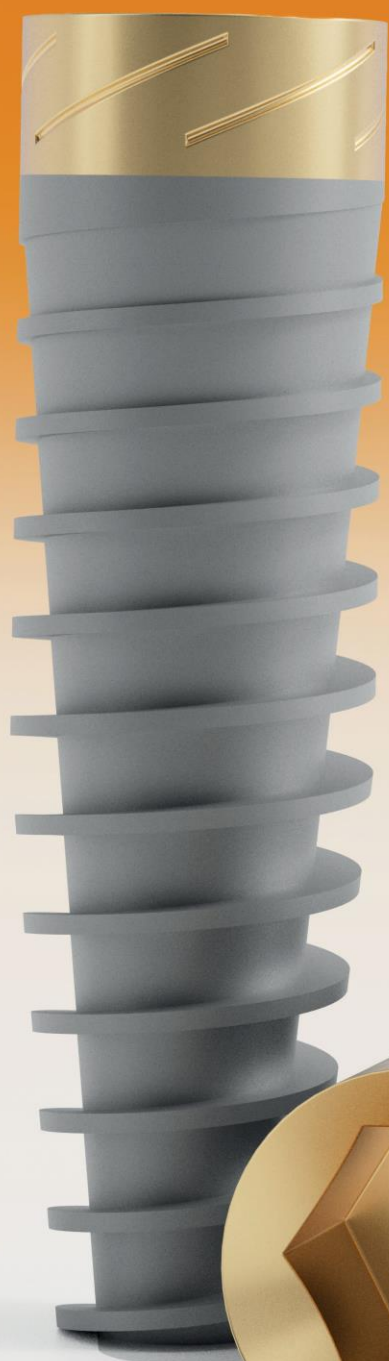

ROCKET
DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE

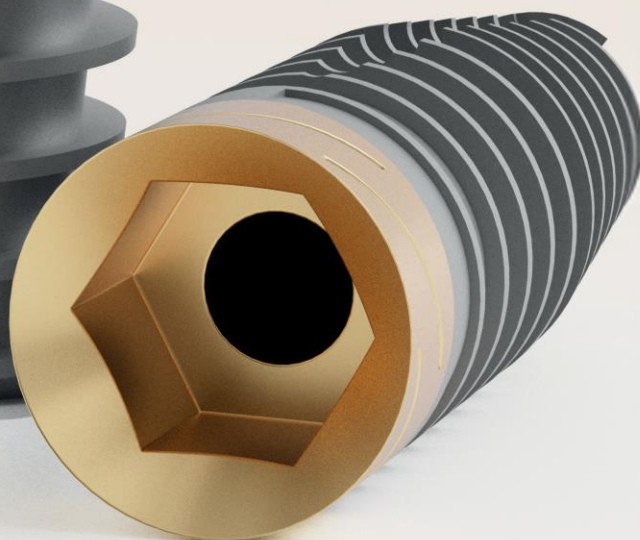

Made in Italy


IMPIANTO DENTALE ROCKET IMPLANT

Con **Rocket Implant** si è voluto sviluppare una linea implantare in grado di rendere la chirurgia ossea il più possibile semplificata, versatile e soprattutto adatta alle diverse tipologie ossee D1 • D2 • D3 • D4.

La sua morfologia presenta un profilo conico e un filetto automaschiante che consente un agevole puntamento nella porzione più prossimale dell'alveolo implantare, guidando l'impianto durante la rotazione e l'avanzamento lungo l'asse osteale.

Dotato di profili di taglio longitudinali per facilitare l'inserimento e la stabilizzazione nelle ossa più compatte (D1 e D2), offre al professionista anche un'elevata efficacia in osso particolarmente tenero o midollare. In questi casi, la maggiore superficie implantare permette di ottenere una buona stabilità primaria anche in condizioni ossee di tipo D3-D4.

Connessione
esagonale
esagono 2,4 mm

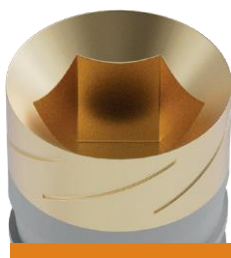

Colletto con
micrifilettatura



Filettatura
a 2 principi

Profilo tagliente
auto-maschiante

Rocket Implant è un sistema implantare della famiglia syntesy, con connessione esagonale.

Questa geometria permette:

- Stabilità meccanica tra componente
- implantare e protesi
- Facile posizionamento dell'abutment
- Buon controllo del torque durante il serraggio
- Distribuzione uniforme dei carichi masticatori

Rocket Implant, oltre a offrire molteplici soluzioni protesiche, presenta una superficie trattata e una superficie macchinata di 1,5 mm a livello della connessione.

Grazie alle sue caratteristiche, **Rocket Implant** consente al professionista di pianificare e realizzare qualsiasi tipo di riabilitazione protesica, ove indicato.

ROCKET
DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE


Rocket Implant EX



Diametri disponibili in mm:
3.70 - 4.30 - 5.00



Diametri minimi consigliati nella riabilitazione implanto-protesica del singolo elemento dentale.

ROCKET
DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE

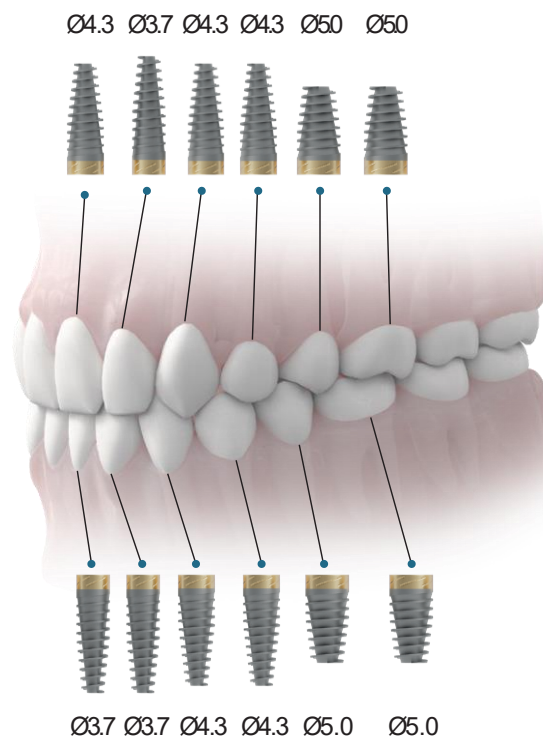

Trattamento superficiale

La superficie implantare SYNTHESY NEWIMPLANT® DUALGRIP® SURFACE microritensiva viene realizzata con un processo standardizzato e controllato di sabbiatura, pulizia e sterilizzazione. Il materiale di sabbiatura AL2O3 ci permette di ottenere una specifica topografia superficiale macro e microruvida differenziata.

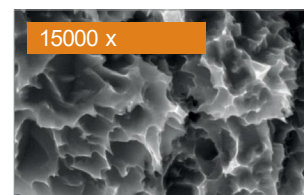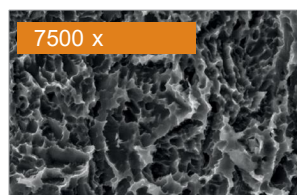


La verifica della resa morfologica ricercata avviene attraverso l'analisi con microscopio elettronico a scansione SEM (Scanning Electron Microscope) che consente un'accurata osservazione della superficie dell'implanto.

Confezionamento e deconfezionamento Rocket Implant




Confezione implanto Rocket Implant

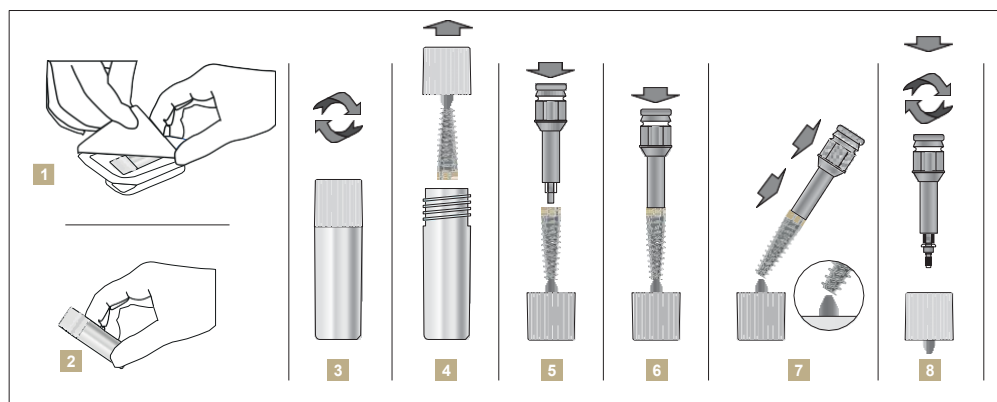


Apertura bliste ed estrazione implanto Rocket Implant

IMPIANTO DENTALE ROCKET IMPLANT


Descrizione	Diametro	Altezza	Codice
Rocket Implant	Ø 3.7 mm	H 8.0 mm	981011
Rocket Implant	Ø 3.7 mm	H 10 mm	981012
Rocket Implant	Ø 3.7 mm	H 11.5 mm	981013
Rocket Implant	Ø 3.7 mm	H 13 mm	981014
Rocket Implant	Ø 3.7 mm	H 15 mm	981015
Rocket Implant	Ø 3.7 mm	H 18 mm	981018

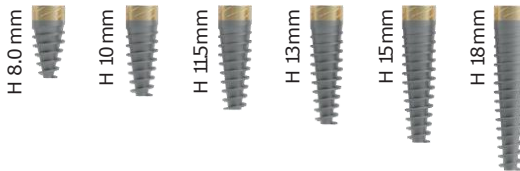




Descrizione	Diametro	Altezza	Codice
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 6.0 mm	981110
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 8.0 mm	981111
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 10mm	981112
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 115mm	981113
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 13mm	981114
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 15mm	981115
Rocket Implant	Ø 4.3 mm	H 18mm	981116

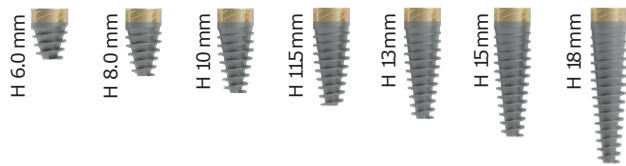



Descrizione	Diametro	Altezza	Codice
Rocket Implant	Ø 5.0 mm	H 6.0 mm	981210
Rocket Implant	Ø 5.0 mm	H 8.0 mm	981211
Rocket Implant	Ø 5.0 mm	H 10 mm	981212
Rocket Implant	Ø 5.0 mm	H 115mm	981213
Rocket Implant	Ø 5.0 mm	H 13mm	981214

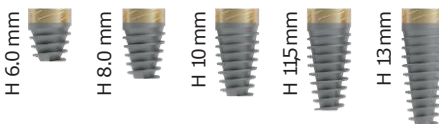

PROTOCOLLI CHIRURGICI IMPIANTI ROCKET IMPLANT

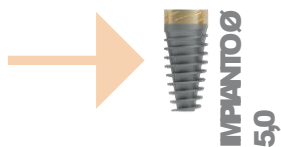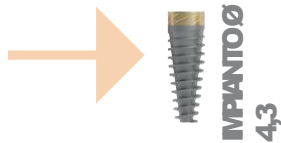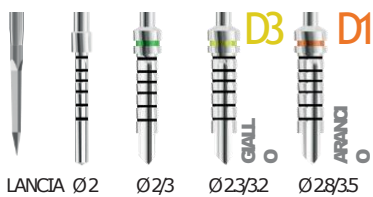

CODIFICA FRESE

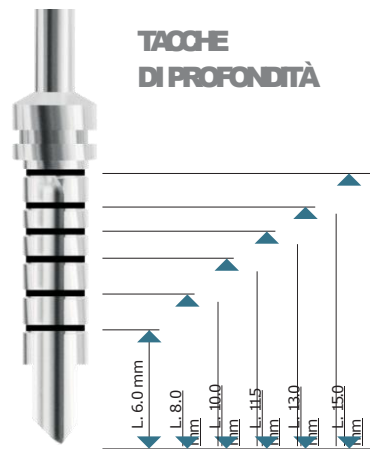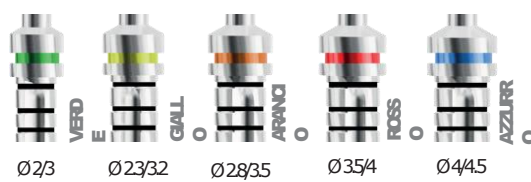**CODIFICA COLORE**

VASSOIO CHIRURGICO ROCKET IMPLANT



Descrizione	Diametro	Codice
Mucotomo		MU
Fresa Lancia	Ø 1.5	FI
Fresa	Ø 2.0	F2
Fresa	Ø 2.3	F2-3
Fresa	Ø 2.3 / 3.2	F2.3 / 3.2
Fresa	Ø 2.8 / 3.5	F2.8 / 3.5
Fresa	Ø 3.5 / 4.0	F3.5 / 4
Fresa	Ø 4.0 / 4.5	F4 / 4.5
Preparatore di spalla	Ø 3.5	P3.5
Preparatore di spalla	Ø 3.8	P3.8
Preparatore di spalla	Ø 4.2	P4.2
Preparatore di spalla	Ø 4.8	P4.8
Preparatore di spalla	Ø 5.3	P5.3

Descrizione	Codice
Cacciavite 1.27 corto	S1001
Cacciavite 1.27 medio	S1002
Cacciavite medio TPA	S1012
Cacciavite 1.27 lungo	S1003
Cacciavite 1.27 corto per contrangolo	S1004
Cacciavite 1.27 lungo per contrangolo	S1005
Driver corto per impianto manuale	S1006
Driver lungo per impianto manuale	S1007
Driver corto impianto per contrangolo	S1008
Driver lungo impianto per contrangolo	S1009
Driver avvitatore per mua	S1010
Driver estrattore	S1011
Chiave dinamometrica K2	S1100

PROTESICA ROCKET IMPLANT

Descrizione	Code
 Vite appo	30001

Torque Raccomandato: 15 Ncm

Descrizione	Diámetro	Alteza	Code
 Vite di guarigione Ø40mm H1mm	Ø40mm	H1mm	37-101
 Vite di guarigione Ø40mm H2mm	Ø40mm	H2mm	37-102
 Vite di guarigione Ø40mm H3mm	Ø40mm	H3mm	37-103
 Vite di guarigione Ø40mm H4mm	Ø40mm	H4mm	37-104
 Vite di guarigione Ø40mm H5mm	Ø40mm	H5mm	37-105
 Vite di guarigione Ø40mm H6mm	Ø40mm	H6mm	37-106
 Vite di guarigione Ø40mm H7mm	Ø40mm	H7mm	37-107
 Vite di guarigione Ø45mm H1mm	Ø45mm	H1mm	37-111
 Vite di guarigione Ø45mm H2mm	Ø45mm	H2mm	37-112
 Vite di guarigione Ø45mm H3mm	Ø45mm	H3mm	37-113
 Vite di guarigione Ø45mm H4mm	Ø45mm	H4mm	37-114
 Vite di guarigione Ø45mm H5mm	Ø45mm	H5mm	37-115
 Vite di guarigione Ø45mm H6mm	Ø45mm	H6mm	37-116
 Vite di guarigione Ø45mm H7mm	Ø45mm	H7mm	37-117
 Vite di guarigione Ø50mm H2mm	Ø50mm	H2mm	37-122
 Vite di guarigione Ø50mm H3mm	Ø50mm	H3mm	37-123
 Vite di guarigione Ø50mm H5mm	Ø50mm	H5mm	37-125
 Vite di guarigione Ø60mm H2mm	Ø60mm	H2mm	37-132
 Vite di guarigione Ø60mm H3mm	Ø60mm	H3mm	37-133
 Vite di guarigione Ø60mm H5mm	Ø60mm	H5mm	37-135

Descrizione	Alteza	Arg	Code
 Abt. 0° senza spalla	H0mm	0°	37-210
 Abutment 0° spalla	H12mm	0°	37-211
 Abutment 0° spalla	H24mm	0°	37-212
<i>Torque Raccomandato: 30 Ncm</i>			
 Abutment 15° spalla	H125mm	0°	37-220
 Abutment 15° spalla	H254mm	0°	37-222
<i>Torque Raccomandato: 30 Ncm</i>			
 Abutment 25° spalla	H125mm	0°	37-230
 Abutment 25° spalla	H254mm	0°	37-232
<i>Torque Raccomandato: 30 Ncm</i>			

Descrizione	Code
 Cacciavite 12° medio	S1002
 Cacciavite medio TPA	S1002
 Cacciavite 12° lungo	S1003

Descrizione	Alteza	Arg	Code
 Abutment Conico 0° H1mm	H1mm	0°	37-360
 Abutment Conico 0° H2mm	H2mm	0°	37-361
 Abutment Conico 0° H3mm	H3mm	0°	37-362
 Abutment Conico 0° H4mm	H4mm	0°	37-363
 Abutment Conico 0° H5mm	H5mm	0°	37-364
<i>Torque Raccomandato: 30 Ncm</i>			
 Abutment Conico 17° H25mm	H25mm	17°	37-368
 Abutment Conico 17° H35mm	H35mm	17°	37-369
 Abutment Conico 30° H25mm	H25mm	30°	37-370
 Abutment Conico 30° H35mm	H35mm	30°	37-371
<i>Torque Raccomandato: 30 Ncm</i>			

Descrizione	Code
 Cappella di guarigione per abutment conico	37-160
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Toretta in titanio per abutment conico	37-367
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Toretta in oro cobalto per abutment conico	HE-48100
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Toretta calibrabile per abutment conico	37-412
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Analogo per abutment conico	37-511
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Analogo digitale per abutment conico	37-514
 Vite	37-061
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Transfer per abutment conico	37-613
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Vite per transfer abutment conico	37-052
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Scan body abutment conico	37-710
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	
 Ti-base H5mm abutment conico	37-725
 Ti-base H7mm abutment conico	37-727
<i>Torque Raccomandato: 15 Ncm</i>	

PROTESICA ROCKET IMPLANT

	Descrizione		Code
	Viteabutment	Toque Raccomandato 30Ncm	37401
	Viteabutmenttpa	Toque Raccomandato 30Ncm	37403
	Viteperma	Toque Raccomandato 15Ncm	37401
	Vitepermatpa	Toque Raccomandato 15Ncm	37403

	Descrizione	Dimetro	Code
	Attacco abbotone	h1mm	37801
	Attacco abbotone	h2mm	37802
	Attacco abbotone	h3mm	37803
	Attacco abbotone	h4mm	37804
	Attacco abbotone	h5mm	37805
	Attacco abbotone	h6mm	37806
			Toque Raccomandato 30Ncm

	Descrizione	Code
	Contenitore acciaio inox	041CAN
	Ritenzione nera per attacco abbotone	043CLN
	Ritenzione gialla per attacco abbotone	060CRVAY
	Ritenzione rosa per attacco abbotone	040CRNSN
	Ritenzione bianca per attacco abbotone	040CRN
	Ritenzione verde per attacco abbotone	049PCN

	Descrizione	Dimetro	Code
	Locator EX	H1	37810
	Locator EX	H2	37811
	Locator EX	H3	37812
	Locator EX	H4	37813
	Locator EX	H5	37814
	Locator EX	H6	37815
			Toque Raccomandato 30Ncm
	Kit di lavaggio locator		HE4910

	Descrizione	Code
	Analogo per impianto	37512
	Analogo digitale per impianto	37513

	Descrizione	Code
	Santransfer	37711
		Toque Raccomandato 15Ncm

	Descrizione	Code
	Abutment provvisorio non rotante	37340
	Abutment provvisorio rotante	37330
		Toque Raccomandato 30Ncm

	Descrizione	Code
	Calcinabile base acciaio non rot.	HE3510
	Calcinabile base acciaio rotante	HE35100
		Toque Raccomandato 30Ncm

	Descrizione	Code
	Abutment calcinabile non rotante	37410
	Abutment calcinabile rotante	37414
		Toque Raccomandato 30Ncm

	Descrizione	Code
	Transfer a chiave chiuso	37611
	Transfer a chiave aperto	37610
		Toque Raccomandato 15Ncm

	Descrizione	Code
	Vite per transfer short	37411
	Vite per transfer astrappo	37412
		Toque Raccomandato 15Ncm

	Descrizione	Alteza	Code
	Flase non rotante	H05mm	37384
	Flase non rotante	H15mm	37385
	Flase non rotante	H30mm	37386
			Toque Raccomandato 30Ncm
	Flase rotante	H05mm	37387
	Flase rotante	H15mm	37388
	Flase rotante	H30mm	37389
			Toque Raccomandato 30Ncm



ROCKET
DENTAL IMPLANT • IMPIANTO DENTALE

PRODOTTO IN ESCLUSIVA DISTRIBUITO DA :



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com